

AJUSTES DEL VISOR 3D

-  Rotación 3D*
-  Ampliar/reducir
-  Hacer clic para establecer el centro de rotación del volumen
-  +  o  Panorámica 3D



RealGUIDE™
SISTEMA ABIERTO UNIVERSAL

ACCESOS DIRECTOS GENERALES

- Tamaño de la herramienta de modelado  + 
- Fuerza de la herramienta de modelado  +   /  
- Área de selección con el pincel 
- Área de anulación de la selección con el pincel  + 
- Deshacer  +   /  
- Rehacer  +   /  

SOLO CAD

- Cambiar la escala de contacto 
- Ocultar el objeto 3D sobre el que se ha hecho clic**  +   /   + 
- Cambiar la transparencia del objeto 3D sobre el que se ha hecho clic**  +   /   + 
- Mostrar el último objeto oculto**  +   /   + 
- Girar pieza  +   /  
- Aplicar escala a pieza  + 
- Estirar pieza  +  +   /  
- Selección de varias piezas en el dentograma  + 

* de forma predeterminada; personalícelo en el proyecto en Ajustes/General desactivando el botón "Utilizar botón primario del ratón [...]"

** de forma predeterminada; personalícelo en el proyecto en Ajustes/Acceso directo

 También es posible utilizar ÚNICAMENTE las teclas de función (F1, F2, F3) en el sistema operativo MAC activándolas. Seleccionar el menú Apple > Sistema > Preferencias > Seleccionar "Teclado" > Hacer clic en "Teclado" > Activar "Usar F1, F2, etc....como las teclas de función estándar"

